

Utilisation des masques de protection de type FFP2


En premier lieu, consulter la notice d'emploi des masques fournis par le fabricant.

La mise en place du masque

Avant toute manipulation du masque, se laver soigneusement les mains.

Tenir le masque et l'ajuster sur votre visage : dépliage complet, liens bien serrés ou élastiques bien en place, pince-nez ajusté, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Le masque doit couvrir la bouche et le nez de la personne, et les élastiques doivent être tendus derrière les oreilles.

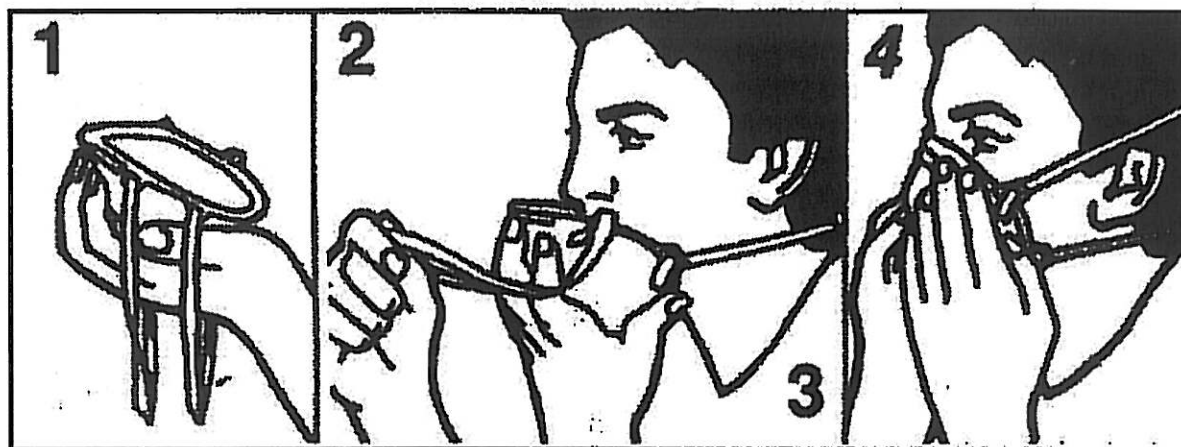

Contrôler l'étanchéité du masque, pour cela :

- placer les deux mains sur le masque et inspirer fortement. Le masque tend à s'écraser. si vous remarquez des fuites entre le masque et le visage, réajustez en serrant le pince-nez et/ou en augmentant la tension des élastiques. Répéter la procédure jusqu'à obtention d'une étanchéité suffisante.

ATTENTION : l'existence d'une barbe ou d'une moustache dépassant du masque compromet l'étanchéité de celui-ci.

- Une fois en place et l'étanchéité vérifiée, les agents ne doivent plus manipuler leur masque pour éviter de le détériorer ou de le contaminer avec les mains.

➤

Remarques :

- chaque masque est à usage unique
- la durée de protection d'un masque respiratoire varie entre 4 et 8 heures en fonction des modèles, et il doit rester sec
- si le masque est humide ou altéré, il faut le changer

Pour retirer le masque

- Une fois le masque utilisé, le retirer et le jeter dans une des poubelles spécialement dédiées au traitement de ce type de déchets
- Se laver soigneusement les mains après avoir enlevé le masque